


# NOUS VOUS PROPOSONS



## MASQUES BARRIÈRES RÉUTILISABLES

NE SE SUBSTITUENT PAS AUX GESTES BARRIÈRES  
CONFORMES AUX EXIGENCES AFNOR SPEC S76-001 ET TESTÉS PAR LA DGA

# Bien **ajuster** son **MASQUE** pour **se protéger**

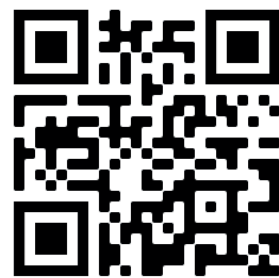

Télécharger la fiche produit  
du masque barrière réutilisable



**1** Se laver les mains à l'eau et du savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation de masque.



**2** Enlever le masque de son emballage et effectuer le lavage selon les recommandations. Procéder au lavage avant chaque utilisation.



**3** Repérer le sens du masque et le placer sur le visage.



**4** Positionner le masque en passant les élastiques de part et d'autre des oreilles.



**5** Abaisser le bas du masque barrière sous le menton.



**6** Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique. Retirer le masque usagé à l'aide des élastiques pour éviter la contamination potentielle.


# MASQUE BARRIÈRE RÉUTILISABLE MBR-UNS2

Ce masque aux qualités respirantes et filtrantes permet de compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Il est destiné aux patients sains ou asymptomatiques, non destiné aux personnels soignants au contact des patients.

Ce masque a été testé par la Direction Générale de l'Armement DGA (25/03/20) - masque catégorie II « UNS2 » : masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.

Il répond aux dernières spécifications de l'AFNOR S76-001.

Il ne s'agit pas d'un dispositif médical, au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni d'un équipement de protection individuelle, au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2), raison pour laquelle il ne doit pas se substituer au masque normalisé.

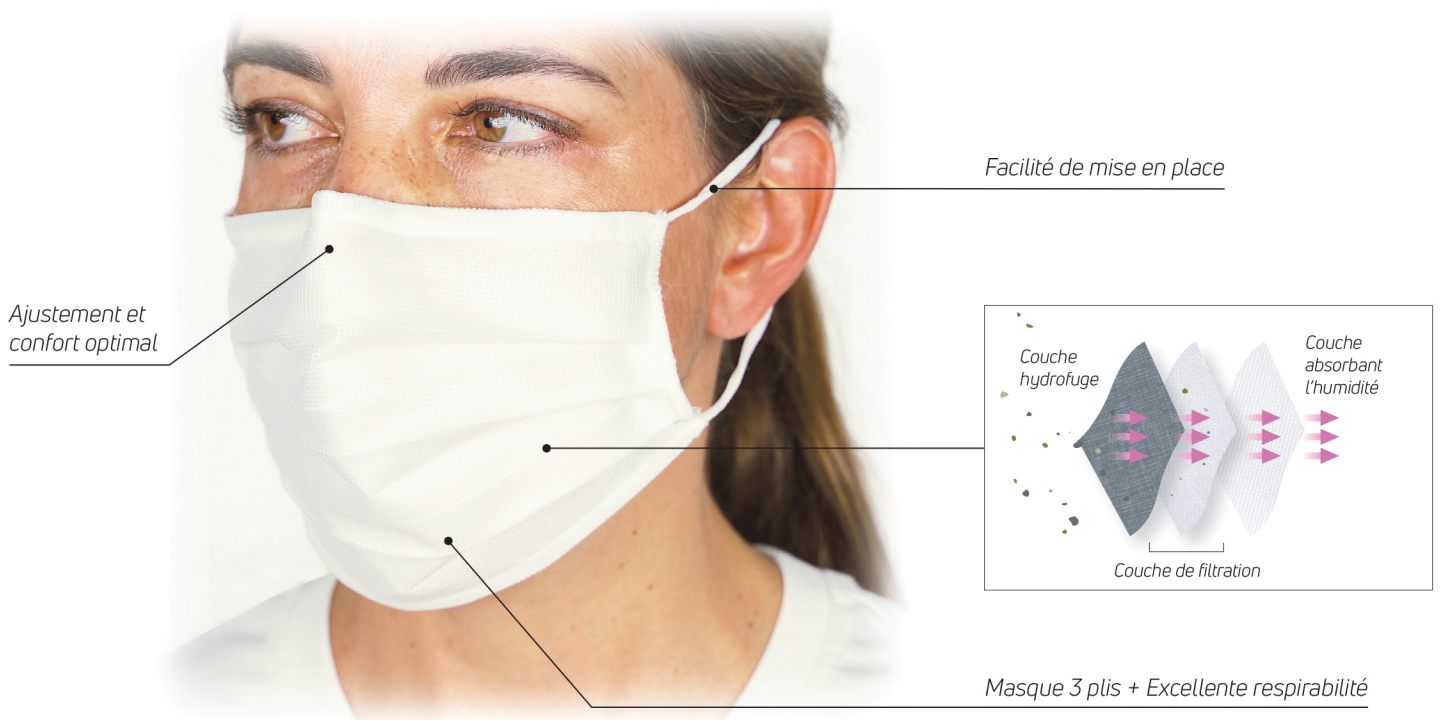

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :

Tissu éco-responsable d'origine France.  
Masque lavable et réutilisable jusqu'à 10 fois.

**Durée de port :** 4 heures.

**Composition :** 82% polyester - 18% polyamide  
Masque bénéficiant d'un traitement antimicrobien.  
Les tissus en contact avec la peau sont certifiés OEKO-TEX 1 afin de respecter les peaux les plus fragiles.

## Performances :

- Filtration : Efficacité de filtration des particules de 3  $\mu\text{m}$  : > 70%.
- Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa.

## CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN :

- 40°C Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
- 20°C
- 60 Laver à 60°C après chaque utilisation de maximum 4 heures avec un détergent classique.
- P Nettoyage à sec possible.
- Sécher à l'air libre ou en sèche linge à basse température.
- Température maximum 120°C.
- Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque. Le masque n'exonère pas des gestes barrières.

**Attention à ne pas altérer ou modifier le masque lors de son usage afin de ne pas diminuer son efficacité.**